

# MerryBack

ryggstöd

sanicare   
your daily life



# MerryBack ryggstöd

är ett manuellt inställbart ryggstöd man kan ha under sin madrass i sängen. Ryggstödet kan ställas in mellan 0-70° i nio fasta lägen. Den låga höjden gör att inget obehagligt mellanrum bildas mellan ryggstöd och sängbotten. Ryggstöd är ett bra hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga och som är sängliggande.



MerryBack är tillverkat i epoxilackerad metall.

Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryBack ryggstöd
Sanicare art nr	145520
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	7 kg
Mått	B 78 x L 70 cm
Max brukarvikt	100 kg
Material	Epoxilackerade stålrör
Rengöring	Vatten och vanliga rengöringsmedel. Se till att ryggstödet torkar ordentligt efter rengöring.
Kasseras	Metall avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling

## Bruksanvisning och råd vid användning:

Ryggstödet ska alltid användas på säng med sänggram/huvudgavel.

### Att höja huvudänden

- Fäll upp madrassen i huvudänden.
- Placera ryggstödet i sängen och välj önskat läge, lägg tillbaka madrassen.

### Att höja fotänden:

- Fäll upp madrassen i fotänden.
- Placera ryggstödet i sängen och välj önskat läge, lägg tillbaka madrassen.

OBS! Gör alltid kontroller att ryggstödet är fast förankrat innan användning.

Ryggstödet skall anpassas efter madrassens storlek. Passar inte till tjockare madrasser så som kontinentalsäng.



Sanicare Hjälpmedel AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr.  
145520



Observera att det finns klämrisk av fingrar vid ändring av position på ryggstödet. Anpassa alltid vinkeln på ryggstödet efter användarens förmåga. Gör alltid kontroller att ryggstödet är fast förankrat innan användning. Använd ryggstödet på sängar med huvudgavel/sänggram för att inte ryggstödet ska glida ur sängen vid användning.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

sanicare  
your daily life

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se